

# COBRA MEDICAL

## *nieuwsbrief*

Jaargang 1 nummer 2

### Verlengslangen

Wij merken dat veel MIC-KEY gebruikers, ouders en verzorgers van iemand met deze laagprofiel voedingskatheter, twijfelen over welk type verlengslang het meest tegemoet komt aan hun wensen. Daarnaast is niet altijd duidelijk hoe vaak een verlengslang vervangen moet worden. Daarom staat in de tweede uitgave van onze nieuwsbrief het onderwerp 'verlengslangen' centraal.



### Voeden via een MIC-KEY

Om voeding toe te dienen via de MIC-KEY zijn verlengslangen nodig. Deze zijn universeel en passen op elke maat MIC-KEY of MIC-KEY jejunale voedingskatheter, ongeacht lengtemaat of diameter (FR). Wel variëren ze in soort en lengte. Kies daarom een type verlengslang dat het beste aansluit bij de manier waarop voeding en medicatie wordt toegediend.

### Juist gebruik verlengt de levensduur

Wij raden aan om de verlengslangen niet langer dan twee weken achter elkaar te gebruiken. Spoel de MIC-KEY ter voorkoming van verstopping dagelijks door met behulp van de verlengslang. Doe dit elke keer voor én na het toedienen van voeding en medicatie, drie tot vijf keer per etmaal (behalve als de slang niet wordt gebruikt). Gebruik hiervoor 30 tot 50 ml lauw water (bij kinderen volstaat 10 tot 15 ml). Als de slang losgekoppeld wordt, krijgt de patiënt geen water binnen en kan er uiteraard onbepert worden gespoeld. Spoel een verstopte MIC-KEY door met een ruime hoeveelheid lauw leidingwater, zonder daarbij kracht te gebruiken. Helpt dit niet, probeer dan een natriumbicarbonaatoplossing (4%). Gebruik in ieder geval nooit een scherp voorwerp of koolzuurhoudende dranken om de voedingssonde weer doorgankelijk te maken.

### Medicijnen

Helaas past de luer-lockspuit precies op de opening van de MIC-KEY. Medicatie mag echter NOOIT rechtstreeks in de voedingspoort worden gespoten. Gebruik ALTIJD een verlengslang om te voorkomen dat het klepje van de poort kapot gaat. Dien voeding en medicijnen nooit gelijktijdig toe en spoel de MIC-KEY en de verlengslang voor en na het toedienen van medicatie altijd door.



Postbus 5153  
9700 GD Groningen  
Nederland  
tel. +31 (0)50 528 04 98  
fax +31 (0)50 528 04 95  
info@cobramedical.nl  
www.cobramedical.nl

België  
tel. +32 (0)70 66 05 70  
fax +32 (0)70 66 05 72

## Soorten slangen

Cobra Medical levert vier soorten verlengslangen in verpakkingen van vijf stuks.


### 0221-12 / 0221-24 / 0222-02

Deze dunne slang heeft 90 graden secur-lock hoekconnector voor aansluiting op de MIC-KEY en een medicijnpoort (Y-connector). De 0221-12 is 30 cm lang en wordt standaard meegeleverd met een MIC-KEY.

De 0221-24 is 60 cm lang. De 0222-02 heeft een lengte van 5 cm. Deze slang is ideaal voor mensen die via de mond gevoed worden en medicatie ontvangen via de sonde.



### 0223-12 / 0223-24

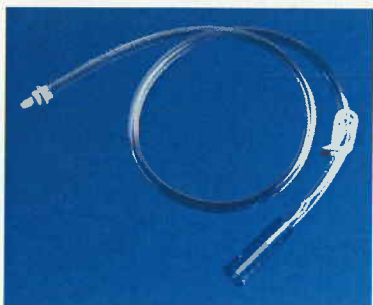


Deze dikke slang met bolusconnector en rechte aansluiting is zeer geschikt voor het toedienen van dikkere voeding, een grotere hoeveelheid voeding ineens of portievoeding met behulp van een grote spuit. De sonde is daardoor ideaal voor mensen die meerdere keren per dag voeding nodig hebben.

De 0223-12 (30 cm) wordt standaard meegeleverd met een MIC-KEY. De 0223-24 is 60 cm lang.

### 0224-12 / 0224-24

Deze dunne slang, uitgerust met een 90 graden hoekconnector en bolusaansluiting, heeft geen medicijnpoort en is ideaal voor mensen die meerdere keren per dag een kleine portie sondevoeding nodig hebben. De slang is verkrijgbaar in een 30 cm- (0224-12) en 60 cm variant (0224-24).

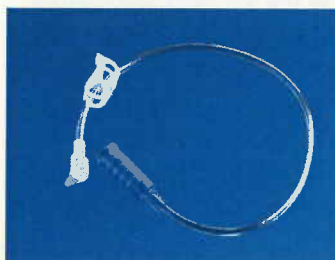

### 0226-12 / 0226-24

Deze dunne slang met stevige luer-lock aansluiting is met name geschikt voor het toedienen van voeding via een voedingspomp (bijvoorbeeld 's nachts).

Er zijn twee lengtematen: de 0226-12 is 30 cm lang en de 0226-24 60 cm lang.

