

# MEETPROCEDURE STOMA

Gebruik de MIC-KEY\* stoma-meetkatheter om de diepte van de gastrostomiestoma te bepalen.

De schachtlengte is de afstand in centimeters tussen de onderkant van de externe steun en het proximale ballonoppervlak wanneer de ballon gevuld is tot 5 ml.

1. Bevochtig de tip van het meetapparaat met een in water oplosbaar glijmiddel of met water.
2. Met de patiënt in zithouding voert u het apparaat via de stoma in de maag in.
  - *Als het niet mogelijk is om de patiënt te laten zitten, tel dan straks 0.3 mm (of één maat) op bij de afgelezen maat in liggende positie.*

## NIET FORCEREN.

3. Vul de ballon met 5 ml schoon water.
4. Trek voorzichtig aan het stomameetapparaat tot u weerstand voelt tegen de binnenzijde van de maagwand.
5. Schuif de plastic schijf tegen de buikwand aan.
6. Lees de markering boven de plastic schijf af. Deze voegt 1 tot 2 millimeter toe aan de exacte meting. Deze hoeveelheid verticale speling wordt als optimaal beschouwd.
7. Herhaal stap 4 t/m 6 met de patiënt in rugligging.
8. Neem het gemiddelde van de twee aflezingen. Dit is de gewenste lengte.
9. Laat de ballon leeglopen en verwijder de meetkatheter.

*N.B.: Deze meetkatheter kan ook over de voerdraad worden gebruikt.*