

8. Medicijnen via de PEG

31

Als u een voedingskatheter heeft, is het niet altijd mogelijk om medicijnen in te nemen. Daarnaast kan de werking van medicijnen veranderen of verdwijnen door verkeerde toediening.

Een PEG-katheter is alléén geschikt voor medicijnen in vloeibare -of volledig opgeloste- vorm. Niet alle medicijnen zijn in vloeibare vorm verkrijgbaar. Bij uw arts of uw apotheek kunt u terecht voor een toedieningsadvies. Ook het Handboek Enteralia is een handig hulpmiddel. In dit boek staat precies omschreven op welke wijze medicijnen mogen worden toegediend aan personen met een voedingskatheter. Dit boek is onder andere verkrijgbaar bij Cobra Medical.

Artikelnummer	Specificaties
 LIT.001	Handboek Enteralia Het toedienen van orale geneesmiddelen aan patiënten met een sonde of slikklachten. 4e druk ISBN-13: 9789031361069

Sommige medicijnen reageren op elkaar. Spoel daarom de PEG-katheter altijd goed door voor en na het toedienen van verschillende medicijnen, zodat er geen resten in de slang achter blijven, en meng medicatie nooit! Ook kan een PEG-katheter verstopt raken door de combinatie van voeding en medicijnen. Deze mogen daarom nooit gelijktijdig, in gemengde vorm, worden toegediend! Fijngemalen tabletten kunnen leiden tot verstopping van de PEG-katheter. Overleg daarom met uw apotheker of het medicijn in een andere vorm, bijvoorbeeld vloeibaar, verkrijgbaar is.

Als de medicatie op een nuchtere maag moet worden ingenomen, wacht dan vervolgens minimaal een half uur met het toedienen van sondevoeding.